

## GUÍA PARA LA RECOGIDA DE MUESTRAS DE SANGRE EN GOTA SECA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD DE POMPE

PROYECTO  
**identify**

### 1. Obtención de sangre

Limpie el área de punción del paciente con alcohol y déjela secar (no utilice desinfectantes que contengan yodo).

**! No se olvide de desechar la primera gota.**

Puede extraer la sangre de dos maneras:

MÉTODO 1



MÉTODO 2



### 2. Manipulación de muestras

Asegúrese de que la sangre cubre el círculo en su totalidad y se extiende a ambos lados del papel de filtro.

CORRECTO



INCORRECTO



Deje secar unas horas la gota en el papel secante.

### 3. Envío

Introduzca la muestra en la bolsa de plástico junto con el desecante. Rellene el formulario de solicitud de realización de la prueba para cada paciente y envíelo al laboratorio utilizando los sobres suministrados.



# PROYECTO identify



LOOKING FOR POMPE